


# C Info



## Candulor op de stand van Oudheusden Dental

Veel  
Candulor  
nieuws

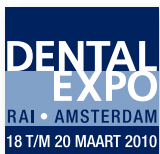

Dental Expo 2010 van 18 - 20 maart  
Amsterdam RAI Convention Centre

Oudheusden Dental BV  
(Stand Nr. A 416)

# De nieuwe Candulor kiezenlijn Bonartic® II NFC

De nieuwe kiezenlijn Bonartic® II NFC maakt het productprogramma van de NanoFilledComposite® elementenlijn compleet. Nu heeft u als tandtechnicus de mogelijkheid om de frontelementen PhysioStar® NFC met de functionele Condyloform® II NFC of met de klassieke Bonartic® II NFC te combineren.

## Functie

De occlusiemorfologie van de laterale elementen van de onderkaak is gerelateerd aan de condylusbaan, zodat de helling van de knobbels bij protrusie 30° bedraagt en bij laterotrusie op 20° ligt. Daarnaast biedt Bonartic® II NFC de noodzakelijke vrije ruimte voor dynamische retrusie, immediate side shift en de benettbeweging.

## Occlusieconcept

Bonartic® II NFC biedt mogelijkheden voor de klassieke, bilaterale occlusie en voor sequentiële geleiding tijdens de laterotrusie. Er is bij de Bonartic® II NFC sprake van puntvormige contacten op convexe gedeeltes.




## Morfologie

Ieder vlak van een tand of kies vervult een bepaalde functie. Juist bij Bonartic® II NFC gaat het daarbij om de vormgeving van de vestibulaire vlakken voor de ondersteuning van wangen en lippen, de proportie en contour van de orale vlakken voor vrije tongbewegingen en daarmee voor de fonetiek.



## Materiaal

Dit nanogevulde materiaal bestaat uit hooggedispergeerd silicium. Dit heeft een silanisatiebewerking ondergaan en gaat zo een verbinding aan met de UDMA-matrix. Door deze combinatie van eigenschappen is het materiaal zeer goed te polijsten, waardoor een blijvende oppervlakteglans mogelijk is. Hoe fijner het oppervlak, des te minder wrijving veroorzaakt contacten met de antagonist en hoe geringer de slijtage.

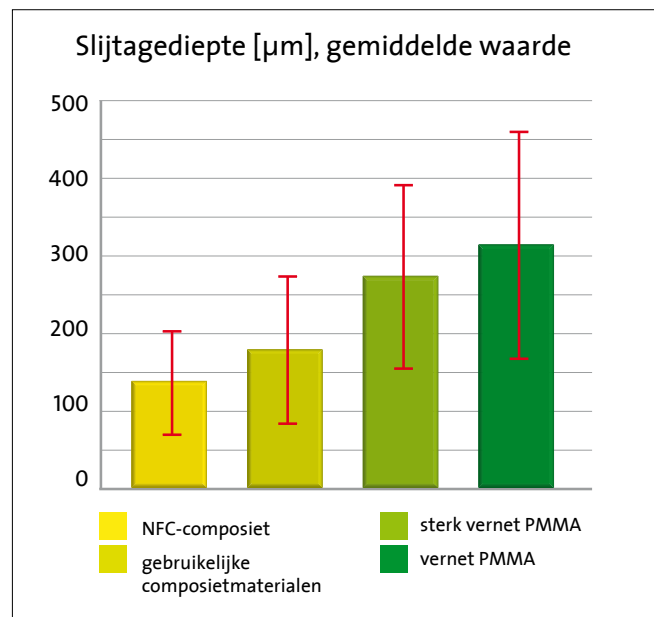

Het Boxplot-Diagram laat zien wat de verticale slijtage (µm) van prothesematerialen na 12 maanden draagtijd is. De rode lijn in het midden geeft het gemiddelde aan. (50% ligt boven en 50% ligt onder deze waarde). Het staaf diagram representeert 50% van alle waarden, de lijn naar boven en beneden geven de extremen aan.

Bron: De klinische studies zijn afkomstig van drie verschillende instellingen.  
 • Dr. med. dent. Siegwald Heintze; In Vitro Forschung bei Ivoclar Vivadent  
 • Prof. Dr. Dr. Ingrid Grunert; Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Innsbruck  
 • Prof. Dr. Eva Piehslinger; Bernhard-Gottlieb-Universität Wien

# Aesthetic Denture Wax Aesthetic Color Wax Set

Door een gezamenlijke ontwikkeling van prothetiek specialisten en gebruikers is de nieuwe modelleerwas, Aesthetic Denture Wax en de karakteriseringswas, Aesthetic Color Wax-Set ontstaan.

## Aesthetic Denture Wax

Dé Modelleerwas in de Candolor kleur 34. Het is qua kleur afgestemd op de Candolor kunststoffen, basisplaten en lepelmaterialen. Door zijn optimale modelleer eigenschappen en ideale verwerkingstemperatuur is het zeer geschikt voor het opstellen van de elementen.



kleur 34

## Aesthetic Color Wax-Set

De 3 voorgekleurde wasen (kleur 53, 55, 57), maken het mogelijk om op snelle en eenvoudige wijze een individueel in gekleurde wasgingiva te maken. Hiermee is het in de wasfase al mogelijk om de patiënt al een beeld te geven hoe de individueel vervaardigde prothese er uiteindelijk uit zal komen te zien.



kleur 55

kleur 53

kleur 57



## Voordelen

De twee hardheden en het hoge smeltpunt, waardoor tijdens het passen een langer verblijf in de mond mogelijk is, zijn de grote voordelen van deze wasen. Door de hoge stollingstemperatuur kunnen de elementen zeer exact geplaatst worden waar ze moeten komen. De opgestelde elementen hoeven hiervoor niet te worden uitgenomen.



## De implantaatgedragen prothese

Door implantaten worden de kauwkrachten verhoogd en direct op het bot overgedragen. Dat dit een uitwerking heeft op de prothese materialen en elementen is een logisch gevolg van dit fenomeen. Deze brochure informeert, u over de mogelijkheden om eventuele problemen in de aanloop al te voorkomen.

**Nu GRATIS bij Oudheusden Dental aan te vragen!**

## C-Box in een volledig nieuwe design

De nieuwe design-tandenkast „C-Box“ uit gepoedercoat aluminium is stabiel en mooi tegelijkertijd. De 4 laden bieden plaats aan maximaal 220 tandenhoutjes. De kunststof inlegvellen maken het mogelijk een optimale presentatie te geven van alle elementen, zodat u altijd het juiste setje onder handbereik hebt.



# De tijd loopt! Sealander Diver Chronograph

**GRATIS\***



\* maximaal 2 horloges  
per adres

Bij aanschaf van

15 **Physiostar NFC**  
setjes à 504,- (netto) of

20 **Bonartic® II NFC**  
setjes à 472,- (netto) of de

**NIEUW!**

20 **Condyloform® II NFC**  
setjes à 472,- (netto)

ontvangt u een exclusief Swiss Military  
Sealander Diver chronograaf horloge

**GRATIS\***

- Behuizing: rvs
- Rubberen armband
- Ø: 44 mm
- 200 m. waterdicht
- Bol geslepen mineraalglas
- Zwitsers precisiekwartsuurwerk Ronda cal. 5030D
- In één richting draaiende lunette
- Functies: tachymeter, kleine secondewijzer, accumulatie-timing, intermediaire timing, datum, stopfunctie centrale wijzer (1/1 sec.), 12-uursteller, 30-minutenteller
- Batterijduur: 48 maanden
- Twee jaar garantie

Actie is geldig tot 1 mei 2010 en zolang de voorraad strekt.

## Candulor op de stand van Oudheusden Dental Stand Nr. A 416

Het doet ons een groot genoegen dat het merk Candulor op de beurs door het competente tweetal, Hilde Kongs en Gert Warzeggers, vertegenwoordigd wordt.



www.team5.com © Copyright 2010 Candulor AG, Wangen/ZH